



# MANUEL SWASH® POUR LE CORPS ET LES CHEVEUX

## Swash® pour le corps

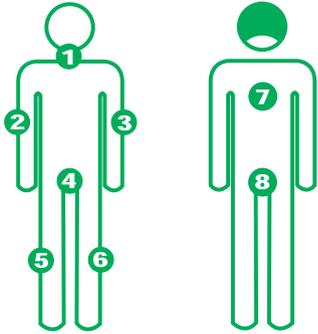


1. Le visage, le cou et la poitrine
2. Le bras droit et l'aisselle droite
3. Le bras gauche et l'aisselle gauche
4. L'abdomen et les parties intimes
5. La jambe droite et le pied droit
6. La jambe gauche et le pied gauche
7. Le dos
8. Le siège

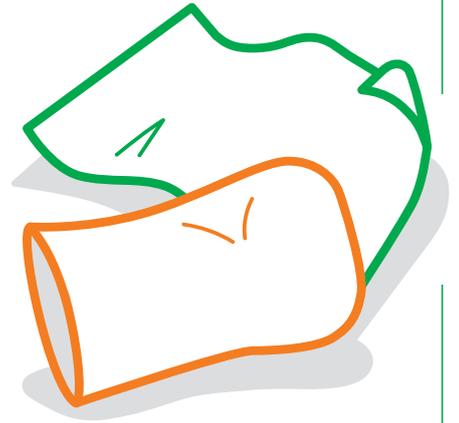

- Utilisez une lingette / un gant de toilette pour chaque partie du corps, comme indiqué ci-dessus.
- Si vous le souhaitez, réchauffez le paquet Swash® avant utilisation.
- Vérifiez la température des lingettes / gants de toilette à partir d'un emballage chauffé avant utilisation.
- Les lingettes / gants de toilette sont à usage unique et doivent être utilisés de manière individuelle.
- Il convient d'essayer la peau avec un papier ou de la cellulose.
- Notez l'heure et la date sur l'emballage. Se conserve 48 heures après l'ouverture, puis il faut le jeter.

## Swash® pour les cheveux

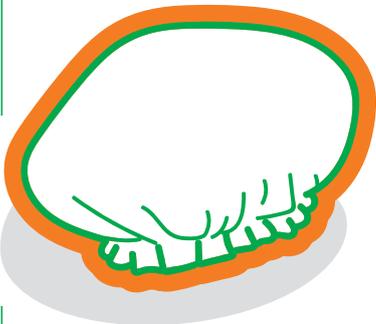

- Si vous le souhaitez, faites chauffer le Shampooing Cap avant utilisation.
- Vérifiez la température d'un Shampooing Cap chauffé.
- Placez le Shampooing Cap sur la tête du patient et emprisonnez tous les cheveux en-dessous.
- Massez les cheveux pendant 2 à 3 minutes.
- Retirez le Shampooing Cap de la tête du patient (ne pas rincer la lotion).
- Séchez à la serviette.
- Peignez les cheveux (peigne fin de préférence).
- Coiffez les cheveux de manière habituelle.
- Le Shampooing Cap est à usage unique et doit être utilisé de manière individuelle.