



Swash® Ganzkörperwäsche

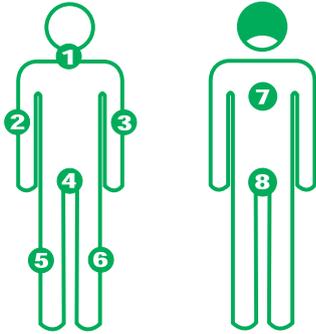

1. Gesicht, Hals und Brust
2. Rechter Arm und Achselhöhle
3. Linker Arm und Achselhöhle
4. Intimbereich
5. Rechtes Bein mit Fuß
6. Linkes Bein mit Fuß
7. Rücken
8. Gesäß

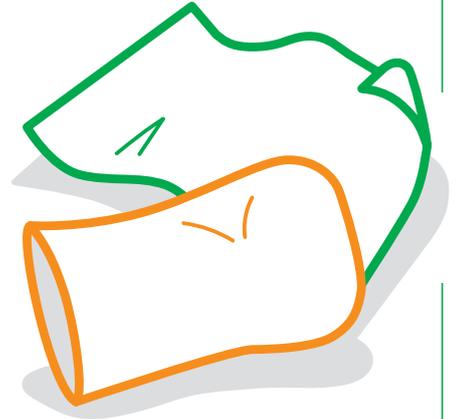


- Einwegprodukt.
- Die Packung ist personengebunden.
- Für jeden Körperbereich (wie oben beschrieben) einen neuen Waschhandschuh verwenden.
- Falls erforderlich, die Swash®-Packung vor Gebrauch erwärmen.
- Die Temperatur der erwärmten Waschhandschuhe vor Gebrauch überprüfen.
- Eine geöffnete Packung nur innerhalb 48 Stunden verwendbar.
- Die Waschhandschuhe nach Gebrauch entsorgen.

Achtung: nicht in der Toilette entsorgen.

- In tiefen Hautfalten ggf. die Haut mit einem Zellstofftuch trocken tupfen.
- Nur zur externen Anwendung geeignet.

Swash® Haarwäsche

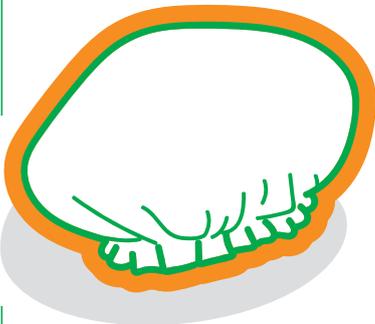

- Falls notwendig, die Shampoo Cap vor der Anwendung erwärmen.
- Die Temperatur der erwärmten Shampoo Cap vor der Anwendung überprüfen.
- Die Shampoo Cap auf den Kopf des Patienten setzen und das Haar vollständig damit bedecken.
- Die vorhandene Haarlotion 2 bis 3 Minuten lang einmassieren.
- Die Shampoo Cap entfernen (Ausspülen der Lotion nicht notwendig).
- Haare mit einem Handtuch trocknen.
- Das handtuchtrockene Haar mit einem feinen Kamm durchkämmen und wie üblich frisieren.
- Die Shampoo Cap ist ein Einmalprodukt.